

Экспандеры молочной железы Модульная система

POLYTECH

Health & Aesthetics



Экспандеры молочной железы с
текстурированной поверхностью
идеально адаптированы для
модульной системы имплантатов
молочной железы

Модульная система


экспандеров молочной железы, € 0483

Описание продукции

Экспандеры молочной железы используются для создания объема тканей после мастэктомии или удаления молочной железы для подготовки к реконструкции молочной железы. Экспандеры Mème, Replicon, Optimam и Opticon очень хорошо адаптированы для использования в сочетании с имплантатами молочной железы модульной системы и используются для оптимального увеличения тканей. Все экспандеры производятся различных размеров и имеют внутреннюю усиленную базу для обеспечения стабильности и поддержки направленной экспансии.

Экспандеры молочной железы анатомической формы обеспечивают лучший эстетический результат при реконструкции груди. Экспандеры Opticon с дополнительно усиленной фронтальной зоной особенно поддерживают экспансию в нижней части молочной железы.

Информация о материалах

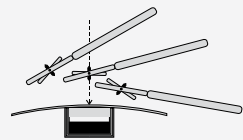

Экспандеры молочной железы с интегрированным магнитным клапаном или с выносным клапаном состоят из силиконового эластомера с текстурированной поверхностью (размер пор: ↓ 200–300µм, Ø100–400µм).

Использование постоянного магнита внутри клапана (Ø20мм) обеспечивает его легкое обнаружение после имплантации. Карданный механизм обнаружения магнита позволяет точно определить положение клапана и направление инъекции. Экспандер нужно наполнять через клапан, в котором содержится пункционный барьер, физиологическим (0,9%), стерильным, апирогенным солевым раствором при помощи иглы ≤23G.

Экспандер молочной железы соединяется с вынесенным клапаном при помощи трубки, длину которой можно изменять. Все экспандеры производятся с большим (Ø17мм) и маленьким (Ø11мм) клапаном. Металлическая пластина внутри клапана служит пункционным барьером.

Показания

- Временное растяжение тканей и кожи, например, для реконструкции после мастэктомии или удаления молочной железы.
- Временное растяжение тканей и кожи для коррекции комбинированных деформаций молочной железы и грудной клетки, таких как синдром Поланда или Pectus Excavatum.

Важная информация

Тканевые экспандеры поставляются упакованными поштучно и стерильными. Магнитный искатель упакован вместе с экспандером. Дополнительные магнитные искатели можно заказать отдельно. Они поставляются упакованными поштучно и не стерильными.

Предупреждение: Экспандеры с магнитным клапаном нельзя устанавливать пациентам, у которых есть водитель ритма сердца!

Внимание: Пожалуйста, обратите внимание на подробные инструкции по использованию, которые прилагаются к каждому продукту.

Кат No.	Макс. объем (мл)	Размеры (мм)		
		A	B	C

Экспандер Mème, текстурированный, с выносным клапаном*

41627-100	100	76	40	76
41627-200	200	96	48	96
41627-300	300	111	54	111
41627-400	400	121	58	121
41627-500	500	131	62	131
41627-600	600	136	64	136
41627-700	700	146	68	146
41627-800	800	151	70	151



Экспандер Replicon, текстурированный, с магнитным клапаном

40637-200	200	101	50	101
40637-300	300	116	56	116
40637-400	400	126	60	126
40637-500	500	136	64	136
40637-600	600	146	68	146
40637-700	700	151	70	151



Экспандер Opticon, текстурированный, с магнитным клапаном

40647-200	200	111	54	93
40647-300	300	126	60	106
40647-400	400	136	64	114
40647-500	500	146	68	123
40647-600	600	156	72	131
40647-700	700	производится по требованию		



Экспандер Optimam, текстурированный, с магнитным клапаном

40677-200	200	101	50	117
40677-300	300	111	54	129
40677-400	400	121	58	140
40677-500	500	131	62	152
40677-600	600	136	64	158
40677-700	700	146	68	169
40677-800	800	151	70	175



Размеры приблизительные

Магнитный искатель

20738-012

* По Вашему требованию Вы можете заказать экспандер Mème со встроенным магнитным клапаном. Для этого просто измените первые две цифры каталожного номера на 40, например, 40627-400 для экспандера Mème со встроенным магнитным клапаном и объемом 400мл.



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 ü 64807 Dieburg ü Germany

Tel.: +49 (0) 60 71 98 63 0 ü Fax: +49 (0) 60 71 98 63 30

www.polytech-health-aesthetics.com

E-mail: info@polytechhealth.com